

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales



DryShield[®]

Aislamiento Simplificado

Descubre la diferencia de Dryshield

Un dispositivo simple que lo hace todo

DryShield realiza todas las tareas de un evacuador de alta succión, bloque de mordida, protector de lengua y protector de vía oral en un dispositivo fácil de usar. El sistema patentado DryShield se diseñó pensando en el dentista y ofrece un control total de la boca de su paciente al mantener el área de trabajo seca, limpia y visible.

Es un avance inteligente para el aislado que brinda niveles inigualables de facilidad y comodidad, tanto para odontólogos como para pacientes. Opte por el ahorro de costos de las boquillas esterilizables en autoclave o la comodidad de las boquillas de un solo uso.

Boquillas esterilizables en autoclave



1. Retractor de mejillas

Mantiene la mejilla del paciente retraída para mejorar la visibilidad y protegerla de traumatismos.

2. Protección de las vías respiratorias

Protege las vías respiratorias de partículas y desechos.

3. Escudo para la lengua y la vía oral

Mantiene la lengua y la vía oral del paciente protegidas de traumatismos.

4. Bloque de mordida

Boquillas esterilizables en autoclave: Bloques de mordida intercambiables disponibles para todos los tamaños de boca para facilitar el acceso y maximizar la comodidad del paciente.

Boquillas de un solo uso: Los bloques de mordida incorporados maximizan la comodidad del paciente.

5. Succión

Remueve el agua, la saliva y los desechos de la boca del paciente para mantener el área de trabajo seca.

6. Diseño fácil de insertar

La boquilla se puede insertar en unos segundos y quitarse aún más rápido.

Tanto que amar, tan fácil de usar

¿Qué distingue a DryShield?

- DryShield diseñó dos, las boquillas esterilizables en autoclave y las de un solo uso, para satisfacer sus necesidades, para ofrecer la máxima asequebilidad o conveniencia.
- La instalación es simple: se conecta directamente al HVE y no se requiere equipo especial.
- Todas las boquillas DryShield están hechas de un material suave y flexible que se adapta a la boca del paciente.
- Cada tamaño de boquilla presenta un bloque de mordida a juego, que le brinda al paciente un lugar firme para descansar y lograr un ajuste perfecto en cada boca.
- La succión continua con manos libres permite que los pacientes se sientan cómodos y que los asistentes realicen múltiples tareas.
- El sistema DryShield se puede transportar entre quirófanos y consultorios.

Integración perfecta y rentable

Totalmente portátil.
Se instala en segundos.



DryShield®

Obtenga más información en DryShield.com o llamando al 1 888 DRY 0300



11230 Grace Avenue, Suite B | Fountain Valley, California 92708 | 1 888 379 0300 | DryShield.com

©2020 DryShield, LLC. Todos los derechos reservados. DryShield y el logotipo de DryShield son marcas comerciales de DryShield, LLC. Patentado y pendiente de patente en los EE. UU. y en todo el mundo. DryShield.com/patents

Muy sencillo.



- 1 Succión**
Mantiene seca, limpia y visible la zona de trabajo (sustituye al eyector de alto volumen y de saliva).
- 2 Bloque de mordida intercambiable**
Mejora el acceso y maximiza la comodidad del paciente para adaptarse a las bocas de cualquier tamaño.
- 3 Protección lingual y de la vía oral**
Proteja la lengua del paciente de los traumatismos (sustituye a los rollos de algodón y las gasas).
- 4 Protección de la vía aérea**
Protege la vía aérea de las partículas y los restos (aislamiento alternativo al dique de goma).
- 5 Retractor de mejillas**
Sujeta la mejilla del paciente para mejorar la visibilidad y protegerla de los traumatismos (sustituye al ángulo seco).
- 6 Diseño fácil de insertar**
La boquilla puede insertarse en apenas unos segundos y quitarse aún más rápido.

Tamaño de las boquillas

Tamaño	Edad	Guías de dentición
Pediátrico	7-8 años o menos	Dentición primaria o mixta
Pequeño	8-9 años y jóvenes adolescentes	Primeros molares permanentes totalmente erupcionados
Medio	Adolescentes y adultos	Segundos molares permanentes existentes
Grande	Adultos	Dentición permanente con gran abertura vertical



Demasiado pequeño



Demasiado grande



Ajuste adecuado

Instalación de DS1

3 sencillos pasos

Ver Video



interactivo



1 Desacople el eyector de alto volumen estándar con el acoplador de la manguera.*



2 Acople el DS1 a la manguera mediante un giro.



3 Coloque el DS1 con la manguera en la barra de herramientas auxiliar.

*Confirme que el compresor de aire dental y el sistema de vacío funcionan antes de usar Dryshield

Conexión

Conexión de la boquilla

Ver Video



interactivo



Rocíe una mezcla de agua y aire con la jeringa en el revestimiento interior del conector de la boquilla.



Deslice y gire la boquilla lubricada con movimientos oscilantes en el DS1 hasta que se quede bloqueada en su sitio debajo.

Colocación

Colocación de la boquilla

Ver Video




interactivo




Pliegue la cola hacia el centro de la boquilla.



Pliegue la cola y los bordes exteriores hacia el centro de la boquilla con una mano mientras controla el bloque de mordida y el DS1 con la otra.

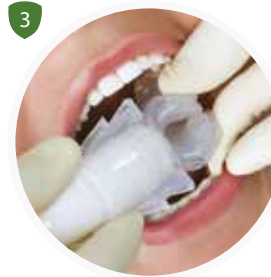

Introdúzcalos lentamente en el centro de la boca, alineando el borde anterior del bloque de mordida a la parte distal del canino (para los niños, la línea central del lateral primario).

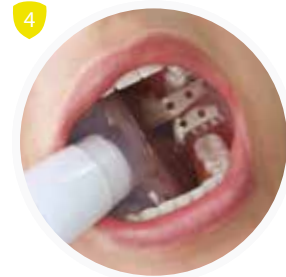

Libere la boquilla, permitiendo que la cola y los bordes exteriores caigan a su posición natural.

Ajuste

Ajuste de la boquilla

Ver Video



interactivo



Presione con el dedo para adaptar el retractor de mejilla a lo largo de la superficie interior de la mejilla. Adapte el área de transición en la parte distal del molar más posterior. Adapte la protección lingual a lo largo de las superficies linguales de los dientes posteriores en el vestibulo lingual.



Coloque el bloque de mordida en distal con respecto al canino maxilar y haga que el paciente muerda el bloque de mordida.



Asegúrese de que el contorno de la boquilla se ajuste con comodidad en la boca del paciente.

Bloque de mordida intercambiable

Acople del bloque de mordida



Ángulo lineal de la tira del bloque de mordida con el ángulo de la región de la tira en la boquilla.



Deslice el bloque de mordida en la boquilla asegurándose de que el tapón esté bien puesto en su sitio y la tira esté alineada con la boquilla.*

Desacople del bloque de mordida



Tire del tapón del bloque de mordida hasta separar el bloque de mordida.



Deslice la tira del bloque de mordida de la boquilla.

*Aunque a casi todos los pacientes les servirá el mismo tamaño de bloque de mordida como boquilla, los bloques de mordida DryShield son intercambiables, por lo que puede acomodarlos en cualquier paciente. Por ejemplo, para un paciente con una apertura limitada, utilice un bloque de mordida de menor tamaño.

Ahorro de tiempo

Odontología general

Procedimiento	Ventaja de DryShield	Beneficios
Obturaciones de composite	Aísla la cavidad oral, mantiene seca la boca, protege la lengua y retrae la mejilla, permitiendo que los procedimientos sean más rápidos y sencillos	Reduce el tiempo de tratamiento
Corona/puente/carilla Preparaciones indirectas	Protege la lengua y la garganta, retrae la mejilla y succiona de forma constante la cavidad oral	Reduce el tiempo de preparación
Impresiones	Aísla la zona de trabajo y mantiene la boca seca para realizar impresiones de alta calidad	Crea impresiones de alta calidad
Cementaciones	Protege la cavidad oral de la aspiración accidental	Garantiza la seguridad del paciente y la protección de la aspiración oral
Restauraciones CAD/CAM	Aísla la cavidad oral y ofrece una succión continua que produce impresiones y restauraciones de calidad	Reduce el tiempo de preparación y produce impresiones de calidad
Restauraciones implantarias	Protege la cavidad oral, permite el control absoluto y la visibilidad superior del área de trabajo	Reduce el tiempo de tratamiento
Extracciones quirúrgicas	Protege la cavidad oral de la aspiración accidental de dientes o fragmentos	Garantiza la seguridad del paciente y la protección de la aspiración oral

Odontología pediátrica

Procedimiento	Ventaja de DryShield	Beneficios
Sellantes	Protege la lengua, succiona de forma continua y mantiene la boca seca para facilitar la colocación de los sellantes de larga duración	Reduce el tiempo de colocación del sellante
Obturaciones	Protege la lengua, retrae la mejilla y succiona de forma constante para facilitar los procedimientos	Reduce el tiempo de preparación
Preparaciones para coronas de acero inoxidable/cerámica	Aísla la zona de trabajo y succiona de forma constante la cavidad oral	Reduce el tiempo de preparación
Cementación de coronas	Protege la cavidad oral de la aspiración accidental durante la cementación	Garantiza la seguridad del paciente y la protección de la aspiración oral
Mantenedor de espacio	Protege la cavidad oral de la aspiración accidental durante la fabricación y la cementación del mantenedor de espacio	Garantiza la seguridad del paciente y la protección de la aspiración oral

Higiene dental

Profilaxis/raspado/alisado radicular	Protege la lengua, retrae la mejilla y succiona de forma constante para evitar las roturas y las interrupciones durante el procedimiento	Reduce el tiempo de tratamiento
--------------------------------------	--	---------------------------------



Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: (33) 5000 9999
Fax: (33) 5000 9960
800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: (55) 5000 9999
Fax: (55) 5000 9972
800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

CENTRO DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

800 262 5000

