



¿Quién es David Hornbrook?

Dr. David Hornbrook DDS, FAACD, FACE, FASDA es un conferencista, ponente y mentor de renombre internacional.

Clasificado por sus colegas como uno de los tres mejores dentistas cosméticos del mundo, el Dr. Hornbrook es muy estimado en los niveles más altos de la odontología estética. Como clínico en ejercicio y Director de Educación y Tecnología en el Laboratorio Dental Utah Valley, el Dr. Hornbrook ofrece una perspectiva única e informada sobre los desafíos que enfrentan los dentistas de hoy en día.

Te presentamos el paso a paso...



ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS


www.coodental.com

GUADALAJARA

Lerdo de Tejada No. 2473
 Col. Arcos Sur, C.P. 44150
 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 (33) 5000 9999
 Fax. 01 (33) 5000 9960
 01 800 2481 COA

CIUDAD DE MÉXICO

Odontología No. 82
 Col. Copilco Universidad,
 C.P. 04360, CDMX
 Tel. 01 (55) 5000 9999
 Fax. 01 (55) 5000 9972
 01 800 0622 COA

MONTERREY

Venado No. 600
 Col. Mitras Centro
 C.P. 64460, Monterrey, NL.
 Tel. 01 (81) 4444 3020

HORN BROOK

Zirconia
Adjusting & Polishing Kit
For Chairside Use
Created in cooperation with
Dr. David Hornbrook



- Paso 1:** Ajuste con piedra verde DTD905 (*Fila delantera*)
- Paso 2:** Pre-pulido con pulidor azul de grano medio DFD deseado (*Fila delantera*)
- Paso 3:** Pulido secundario con pulidor gris de grano fino DFD deseado (*Fila del medio*)
- Paso 4:** Pulido final con DiaShine y cepillo de cerdas deseado (*Fila trasera*).

HORN BROOK

Lithium Disilicate
Adjusting & Polishing Kit
For Chairside Use
Created in cooperation with
Dr. David Hornbrook



- Paso 1:** Ajuste con piedra verde DTD905 (*Fila delantera*)
- Paso 2:** Pre-pulido con pulidor azul de grano medio DFD deseado (*Fila delantera*)
- Paso 3:** Pulido secundario con pulidor rosa de grano fino DD deseado (*Fila del medio*)
- Paso 4:** Pulido final con DiaShine y cepillo de cerdas deseado (*Fila trasera*).

