

# KENDA®

DENTAL POLISHERS



coa

Soluciones®  
Odontológicas  
Integrales



FABRICAMOS PULIDORES  
DESDE 1977



SUPERVISAMOS A FONDO  
NUESTRO PROCESO DE FABRICACIÓN



SELECCIONAMOS CUIDADOSAMENTE  
NUESTRAS MATERIAS PRIMAS



REALIZAMOS UN ESTRICTO CONTROL  
DE CALIDAD



ESTAMOS CERTIFICADOS EN ISO  
DESDE 1996



PULIDORES RECONOCIDOS  
A NIVEL MUNDIAL

[coadental.com](http://coadental.com)


# RESINAS, COMPÓMEROS E IONÓMEROS DE VIDRIO

## KENDA C.G.I.

CONTORNEO  
DE SUPERFICIES  
ÁSPERAS

ACABADO Y  
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE  
ULTRA BRILLO

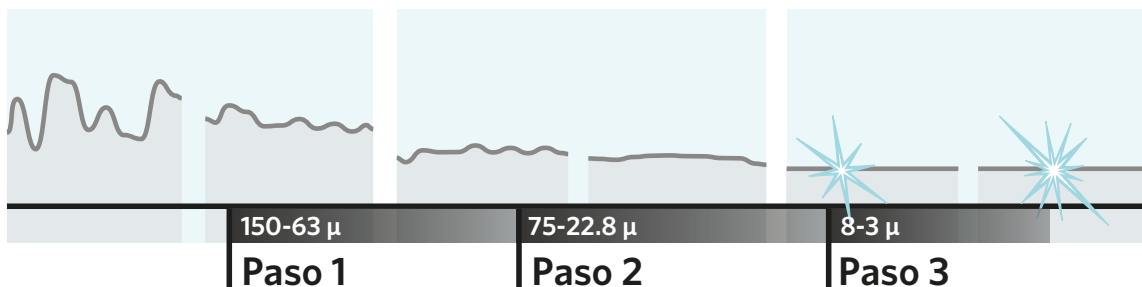


Paso 1 (blanco):  
Contornea



Paso 2 (verde):  
Suaviza



Paso 3 (rosa):  
Pulido brillante

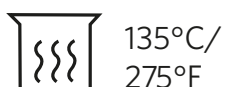

- ★ Sistema con tres granos de tamaños diferentes
- ★ Cubre todo el proceso, desde el contorneo hasta el alto brillo
- ★ Flexible, se adapta a la superficie del diente
- ★ El pulidor blanco ayuda a dar acabado a los márgenes rápidamente








CONTORNEO DE SUPERFICIES ÁSPERAS


ACABADO Y PULIDO SUAVE

TERMINADO DE ULTRA BRILLO

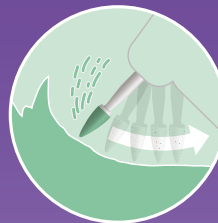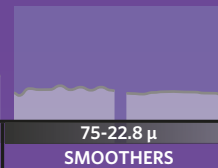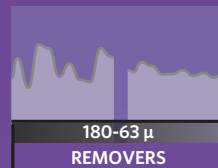

Pulidor verde para remover rápidamente y contornear

REMOVERS

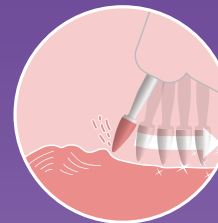

Pulidor rojo para alisar y dar brillo

SMOOTHERS



Pulidor violeta para un brillo superior

SHINERS



max. 5'000rpm

- ★ Nuevas mini formas para mayor precisión
- ★ Mangos cónicos para mejor visibilidad
- ★ No necesitan montarse, no hay que atornillarlos ni usar broches
- ★ No hay pérdidas de tiempo para limpiar las copas
- ★ Eliminan la contaminación cruzada al ser desechables
- ★ Polishette produce resultados asombrosos para lograr superficies lisas de alto brillo
- ★ Mangos sólidos
- ★ No salpican, no necesitan pasta




# ZIRCONIA Y CERÁMICAS

## KENDA Z-SERIES

CONTORNEO  
DE SUPERFICIES  
ÁSPERAS

ACABADO Y  
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE  
ULTRA BRILLO

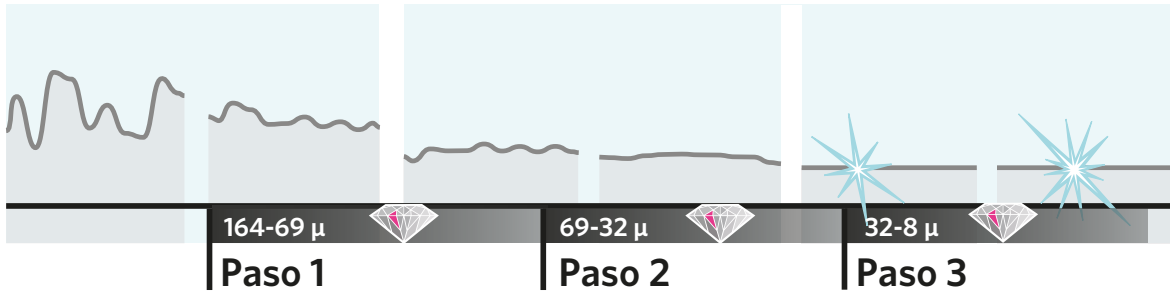

Paso 1 (violeta):  
Contornea



Paso 2 (azul):  
Suaviza



Paso 3 (limón):  
Restaura el glaseado



- ★ Para todas las cerámicas incluyendo alúmina, zirconia y disilicato de litio
- ★ Alto contenido de diamante para un desempeño superior
- ★ Tres granos diferentes que cubren todo el proceso, desde el ajuste hasta el pulido de alto brillo
- ★ Los resultados suaves minimizan la abrasión del esmalte antagonista




ACRÍLICO

# KENDA ACRYLIC BLUE

CONTORNEO  
DE SUPERFICIES  
ÁSPERAS

ACABADO Y  
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE  
ULTRA BRILLO

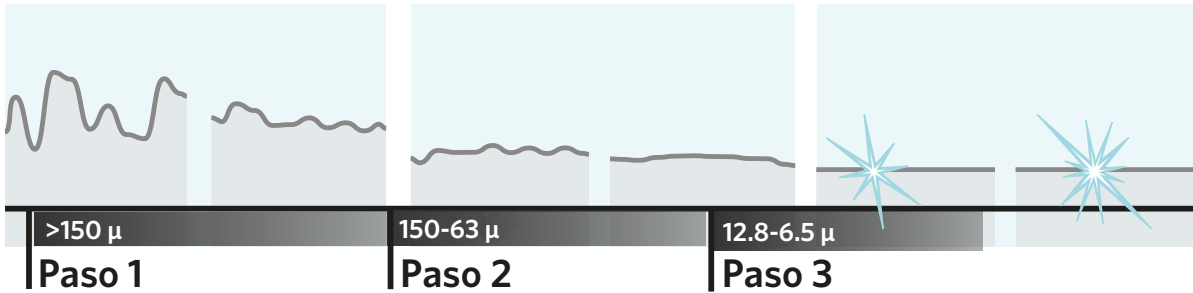

Paso 1 (azul oscuro):  
Contornea



Paso 2 (azul claro):  
Suaviza



Paso 3 (amarillo):  
Da brillo

- ★ Con granos abrasivos que dejan un pulido suave
- ★ Duradero
- ★ Sistema comprobado a través de los años



# ACRYLIC DENTURE FINISHING SET

## KENDA YELLOW LINE

- ★ Pulido final ideal para la clínica dental para realizar pequeños ajustes
- ★ El grano fino evita los ajustes excesivos
- ★ Rueda en espiral para facilitar el pulido de las áreas interdentes.



μ grano	color	rec.	max.
Medio	Amarillo	7,500 - 10,000 RPM	10,000 RPM
Refill de caja:	Presión:	Estaño:	
3	0,3 - 2N	HP, Acero inoxidable	



**coa**

### Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473  
Col. Arcos Sur, C.P. 44150  
Guadalajara, Jal. México.  
Tel: 01 (33) 5000 9999  
Fax: 01 (33) 5000 9960  
01 800 2481 COA

### Ciudad de México

Odontología No. 82  
Col. Copilco Universidad,  
C.P. 04360, CDMX  
Tel: 01 (55) 5000 9999  
Fax: 01 (55) 5000 9972  
01 800 0622 COA

### Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.  
Mitras Centro C.P.  
64460, Monterrey, NL  
Tel: 01 (81) 4444 3020

### Chile

Las Encinas 3296  
Ñuñoa, Santiago, Chile  
Fono: (562) 7905200

### ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

01 800 COA (262) 5000



coadental.com