
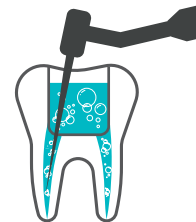
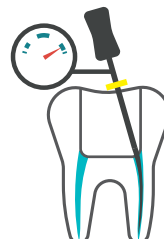
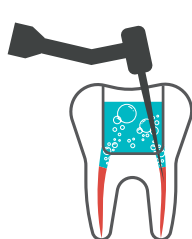


El concepto Dual Rinse®

Limpieza, desinfección y acondicionamiento continuo

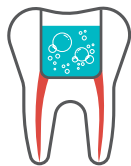

Preparar la solución "todo en uno"

1 cápsula de Dual Rinse HEDP por
10 ml de hipoclorito sódico (NaOCl) (0,5 - 5,25%)

Irrigar en la cavidad de acceso cameral

Depositar la solución en la cavidad de acceso
0,5 - 1 ml

Preparación del tercio coronal del conducto radicular

Conformar con un reservorio de la solución irrigadora en la cavidad de acceso
0,5 - 1 ml por conducto/instrumento

Determinación electrónica de la longitud de trabajo

Glide Path
Sin solución en la cavidad de acceso

Instrumentación

Instrumentar con los conductos radiculares rellenos de la solución irrigadora
0,5 - 1 ml por conducto/instrumento

Irrigación final*

Irrigar, agitar o activar, renovar la solución
Mínimo 1 ml por conducto radicular

*El tratamiento se considera finalizado cuando la «prueba del Champán» es negativa, es decir, cuando no aparecen nuevas burbujas en la solución después de la agitación/activación.

Designed by Dr. Silvio Lottanti

Una solución es la solución



www.medcem.eu