

SOSTENIENDO EL INSTRUMENTO

Sostenga el instrumento con un toque ligero.

Quitar el sarro realizando trazados suaves; no fracturar el sarro.

BENEFICIOS

+ Un agarre más ligero y ergonómico protege y minimiza el riesgo de problemas en la mano y/o muñeca.

+Un agarre ligero aumenta la vida del instrumento

+Menos posibilidad de pulir el sarro con un instrumento siempre afilado

+Ahorre tiempo

+Mejora la comodidad del paciente

+Disminuye el ruido del scaler brindando comodidad auditiva

+Menos presión lateral ampliando la eficacia.



DIRECTRICES

Los instrumentos XP están diseñados para el raspado sub gingival fino y pulido radicular.

Evite usar sobre márgenes y fuera de ellos.

Usted no necesita cambiar la forma en realiza el tratamiento, simplemente utilice menos fuerza y un agarre más ligero.

Debido al diseño de hoja más delgado, no recomendamos que afile sus instrumentos XP.

Con el uso y mantención adecuados, usted puede esperar que sus Instrumentos XP duren tanto como los instrumentos de acero inoxidable, sin la necesidad de afilar.