



NeoPUTTY™



Nueva generación de material premezclado para tratamiento de raíz y pulpa

- Mayor radiopacidad
- Resistencia al lavado inmediata
- Consistencia ideal
- No mancha

coa

Soluciones®
Odontológicas
Integrales

Un estándar más alto en masilla bioactiva biocerámica

NeoPUTTY está premezclado y optimizado para un manejo y colocación más eficientes. Su consistencia firme, baja adherencia, resistencia al lavado y bioactividad lo convierten en la masilla premier para 12 de tus procedimientos más importantes.

NeoPUTTY ofrece un excelente rendimiento para procedimientos dentales que tienen contacto con pulpa vital y tejido perirradicular:

- ✓ Recubrimiento pulpar directo e indirecto
- ✓ Pulpotomía parcial
- ✓ Revestimiento y base de cavidad
- ✓ Pulpotomía y apexogénesis
- ✓ Reparación de perforaciones
- ✓ Reabsorción
- ✓ Obturación
- ✓ Apexificación
- ✓ Relleno de extremo de raíz.

NeoPUTTY es fácil de usar y ofrece resultados predecibles y consistentes en un entorno seco o húmedo, ya sea llenando una perforación, realizando terapia pulpar vital o durante cirugía apical.

– Sayeed Attar, DDS, MS


Endodoncista

No se seca

No se seca entre usos, manteniendo una consistencia ideal durante su uso.

La mayor radiopacidad en su clase

8.1 mm equivalente AI de radiopacidad.

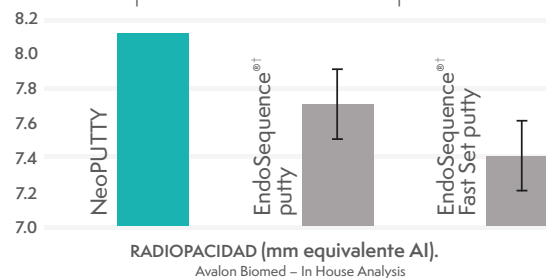

Estable dimensionalmente

Sin contracción para asegurar un sellado sin espacios, minimizando la oportunidad de infiltración bacteriana.

NeoPUTTY

0.08% expansión

ADA 57 std. $\leq 1\%$ contracción y $\leq 0.1\%$ expansión

Resistente al lavado inmediatamente

Permanece donde lo deseas para que puedas completar el procedimiento de manera eficiente, asegurando el beneficio bioactivo.

Tiempo de trabajo extendido



**Se fragua en vivo en presencia de humedad

† EndoSequence® BC RRM-Putty™ and BC RRM-Fast Set Putty™ are trademarks of Peter Brasseler Holdings LLC.

1 J Dent. 2014 May;42(5):517-33. A review of the bioactivity of hydraulic calcium silicate cements.

Niu LN, Jiao K, Wang TD, Zhang W, Camilleri J, Bergeron BE, Feng HL, Mao J, Chen JH, Pashley DH, Tay FR

No mancha

- ✓ No decolorará los dientes — **NUNCA**
- ✓ El NaOCl no causará decoloración.

Sin resina

Para máxima bioactividad.

Alto pH

Para promover la respuesta osteogénica.

Bioactividad a base de MTA


Se forma hidroxiapatita para asegurar un sellado bioactivo.

Consistencia firme y de baja adherencia

Masilla uniforme, firme y de baja adherencia que facilita la colocación y condensación.

A diferencia de los materiales inertes de resina y óxido de zinc-eugenol (ZOE), el MTA proporciona tecnología de vanguardia para promover la bioactividad y apoyar la curación.

- Después de la colocación del MTA en el diente, los fluidos corporales infiltran la pasta para causar el fraguado.
- Durante este proceso, se liberan iones de calcio e hidróxido del MTA, promoviendo la formación de hidroxiapatita (HA) en las superficies del MTA.
- Cuando el HA recubre la superficie, oculta el MTA subyacente para minimizar las reacciones de cuerpo extraño y apoyar las respuestas de curación del tejido pulpar o periapical.

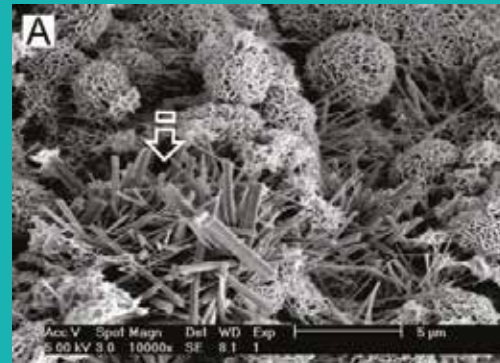

Cristales precipitados de fosfato de calcio dispersos en la superficie del cemento de silicato tricálcico hidratado¹.

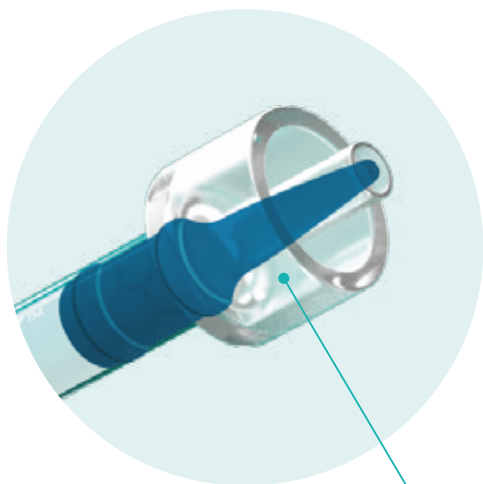


Imagen de alta magnificación de los cristales de fosfato de calcio¹.

Los clínicos no deberían tener que elegir entre dar a sus pacientes el mejor cuidado o ahorrar dinero en su práctica. Nuestra misión es ofrecer ambos.


– Carolyn Primus, PhD

Inventora del White ProRoot® MTA², Grey MTA Plus®, NeoMTA Plus®, NeoMTA® 2, NeoSEALER™ Flo, NeoPUTTY™



Punta para un desplazamiento total y cero desperdicio.

* PROROOT®, DENTSPLY®, and DENTSPLY SIRONA® are registered trademarks of DENTSPLY SIRONA Inc.
² Patented under US Patent No. 7,892,342 owned by DENTSPLY International Inc.

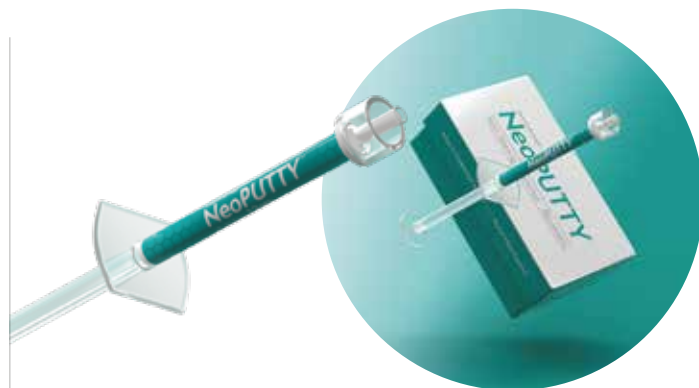

NeoPUTTY, la mas radiopaca masilla bioactiva biocerámica en su clase.

NeoPUTTY es un cemento biocerámico bioactivo libre de resina con propiedades de manejo superiores. Su consistencia firme, baja adherencia, resistencia al lavado y bioactividad lo convierten en la masilla premier para 12 de tus procedimientos más importantes.

Disponible en:

Código	Descripción del producto
AVA001	NeoPUTTY - 0.5 gm Kit

coa®

LÍNEA DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

800 262 5000
atn.odontologos@coadental.com

WhatsApp
33 31 678 001

